

## Hallux Valgus Korrektur Bandage (Ultrathin Bunion Corrector)

### Anwendungsbereich und Eigenschaften

Diese Hallux Valgus Bandage ist für den präventiven Einsatz zur Vermeidung von Überbeinenzündung, Ballenzeh und deren Folgeerscheinungen wie Deformierung des Großen Zehes konzipiert. Bei leichter bis mäßiger Deformierung kann bei regelmäßigem Tragen eine Korrektur in Richtung der Vordeformierungsstellung erzielt werden. Bitte achten Sie darauf, die Ursachen des Krankheitsbildes (z.B. ungeeignetes Schuhwerk, zu enge Strümpfe) zusätzlich zu betrachten.

Faustregel: Der Beginn der Anwendung erscheint solange als sinnvoll, alsbald der Große Zeh noch eigenständig über das Gelenk lateral bewegt werden kann. Durch das sehr dünne Verbundgewebe kann der Artikel unter Strümpfen oder Strumpfhosen getragen werden und ist auch in Businesschuhen noch angenehm zu tragen.

### Anziehanleitung

**Ultrathin Bunion Korrektor** ist jeweils anatomisch dem linken oder rechten Fuß angepasst und dementsprechend für jede Größe in der Ausführung „Links“ oder „Rechts“ erhältlich. Bitte achten Sie hierzu auf die Etikettierung der Verpackung. Das Produkt ist für den direkten Hautkontakt geeignet. Sollten dennoch bei Überempfindlichkeit Hautirritationen auftreten, setzen Sie die Benutzung bitte ab und kontaktieren Sie ggf. einen Arzt.



1.

Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung, falten es auf und ziehen es zunächst ähnlich einer Socke an, bis die kleinen Zehen in der großen Öffnung sichtbar werden.



2.

Ziehen Sie die Funktionsschleife über den Großen Zeh bis die kleine Öffnung die Zehenspitze erreicht. Bitte achten Sie darauf, dass zu scharfkantige Zehennägel das Material beschädigen können.



3.

Ziehen Sie die Bandage über das Fersenband und fixieren es.



4.

Ziehen Sie nun das Fußrückenteil (Pfeil) in Korrekturrichtung bis:  
a. Die Druckentlastungsöffnung im Teil des großen Zehes mittig positioniert ist.  
b. Der Große Zeh über eine moderate Zugspannung einen Abstand zum nächsten Zeh hat. Eine Druckspannung ist gewollt und bewirkt die gewünschte Korrektur.

### Waschanleitung

- Handwäsche bis 30°C
- Bitte keine Bleichmittel verwenden! Benutzen Sie bitte ein neutrales Waschmittel.
- Zum Trocknen bitte für eine gute Durchlüftung sorgen. Nicht geeignet für Wäschetrockner.
- Nicht Bügeln!
- Keine chemische Reinigung

### Aufbewahrung

- Das Produkt bitte keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Trocken und mit ausreichender Belüftung lagern.

### Material

Nylon, Polyurethan

### Packungsinhalt

1 x Hallux Valgus Bandage

### Entsorgung

In Deutschland bitte über den Restmüll entsorgen. Die sonstigen Entsorgungsbestimmungen anderer Länder bitte entsprechend beachten.

### Achtung !

- Das Produkt bitte ausschließlich nach den Angaben der Bedienanleitung verwenden.
- Der Artikel enthält Kunstfasern. Bei Hautirritationen oder anderen Beschwerden setzen Sie bitte das Produkt ab und konsultieren einen Arzt.
- Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Kleidungsstücke im Fersenband oder der Funktionsschleife einklemmen.

Größe	Fußlänge	Schuhgröße	Umfang Großer Zeh	Umfang des Spanns
XS	19 – 21 cm	33 – 35,5	6,5 cm – 7,5 cm	18 cm – 20,5 cm
S	21 – 23 cm	36 – 37,5	7 cm – 8 cm	20 cm – 22,5 cm
M	23 – 25 cm	38 – 40,5	7,5 cm – 8,5 cm	22 cm – 24,5 cm
L	25 – 27 cm	41 – 44	8 cm – 9 cm	24 cm – 26,5 cm
XL	28 – 31 cm	45 – 48	9 cm – 10 cm	26 cm – 28,5 cm

Vertrieb durch:



Rhabanusstraße 38  
65375 Oestrich-Winkel  
Tel: 0 67 23 – 8 08 11 10  
Fax: 0 67 23 – 8 08 11 12  
E-Mail: info@n-ippin.com  
Homepage: www.n-ippin.com  
Online-Shop: shop.n-ippin.com

**Daiya Industry Co., Ltd.**  
1253, Ofuku, Minami-ku, Okayama, Japan 701-0204  
Fertigungsnummer: 321671 | letzte Überarbeitung: Feb 2014

