

## Mommy`s Thumb – Daumen- und Fingerbandage

Mommy`s Thumb Daumen- und Finger Bandage kann beidseitig getragen werden.



### Anwendung

Zur Prävention, Behandlung und Nachbehandlung bei:

- Sehnenscheidenentzündungen und Bänderinstabilität
- Andere Sehnen- und Muskelschmerzen, Verspannungen, Schmerzen beim Beugen sowie Strecken von Daumen und Fingern
- Bei „Computerdaumen“ (Überbelastung bei Schreibtischarbeiten und Arbeiten mit einer PC-Mouse oder Tastatur)
- Zu leichter bis mäßiger Immobilisierung von Daumen und Fingern
- Zum Schutz bei Problemen am Daumensattel (z. B. Gelenkarthrose, Rhizarthrose)
- Kahnbeinverletzungen
- „Mami-Daumen“ (Belastungsschmerzen durch Tragen von Kleinkindern)
- Zur Prävention und Unterdrückung von Überbeinen (Ganglien)

### Waschanleitung

- Handwäsche mit lauwarmen Wasser < 30°.  
Die Bandage ist sehr schnell trocknend
- Bitte keine Bleichmittel oder Färbungsmittel verwenden
- Nur Lufttrocknung – keine Trockner

### Achtung



- Bitte verwenden Sie diese Bandage / Orthese ausschließlich zu den dafür vorgesehenen Zwecken.
- Bitte verhindern Sie die Zugänglichkeit durch Kleinkinder.
- Bitte Vorsicht vor Blutstauungen, falls die Kompression zu stark sein sollte. In diesem Fall bitte eine andere Größe verwenden oder die Bandage nicht weiter verwenden.
- Mommy`s Thumb Daumen- und Finger Bandage besteht aus Kunstfasern. Bei Hautrötungen durch Unverträglichkeit bitte die Behandlung abbrechen.
- Enthält ausschließlich Kunstfasern nichttierischem Ursprungs

### Packungsinhalt

1 x Mommy`s Thumb Daumen- und Fingerbandage  
1x Gebrauchsanleitung


Grösse	Daumenumfang	Handgelenkumfang
L	6 - 7 cm	16 - 18 cm
M	5.5 - 6.5 cm	14.5 - 16.5 cm
S	5 - 6 cm	13 - 15 cm

### Anziehanleitung


1. Schlüpfen Sie mit der kompletten Hand durch die Handgelenkschleife

2. Bevor Sie mit Daumen oder Finger in die Orthese schlüpfen, wird der Ort der Kompression oder Immobilisierung, je nach Schmerzlagerung festgelegt. Hierbei gilt: Treten die Schmerzen beim Beugen von Daumen und / oder Fingern, oder aber beim Strecken / Spreizen auf, ist eine unterschiedliche Position der Kompression notwendig.

2a. Treten die Schmerzen beim Beugen (Greifen) von Daumen oder Fingern auf, ziehen Sie die Handgelenkschleife gemäß

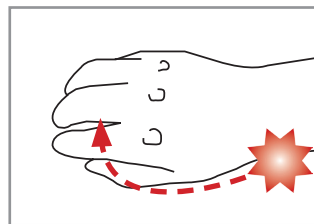


2b. Verspüren Sie die Schmerzen beim Strecken (Spreizen) von Daumen und Fin-

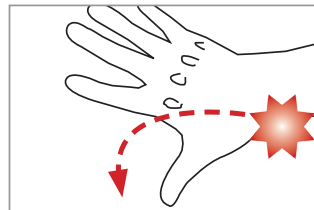


3. Ziehen Sie die Fingerorthese nun über den zu stabilisierenden Daumen oder Finger und justieren Sie die Bandage, wiederum durch Verschieben der Handgelenkschleife ggf. leicht nach.



4. Diese Orthese kann, falls notwendig, den unterschiedlichsten anatomischen Begebenheiten angepasst oder bei zu engem Sitz in den Zwischenräumen von Daumen und Fingern, durch Zuschchnitt angepasst werden. Die Zurichtungsmöglichkeiten werden in der weicheren Materialkomponente quasi als Schablone dargestellt. Beim Zuschchnitt der Bandage bitte in kleinen Schritten arbeiten und beim Umgang mit einer Schere die Bandage bitte aus Sicherheitsgründen vorher ausziehen.

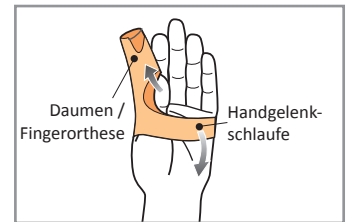

Abbildung, in Richtung der Handrücken. Der Kompressionsdruck der Bandage liegt somit auf der Außenseite der Hand.

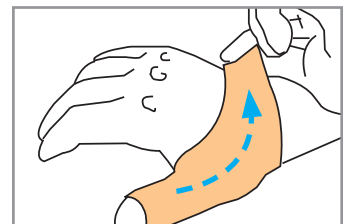

gern, ziehen Sie die Handgelenkschleife in Richtung der Handinnenfläche.

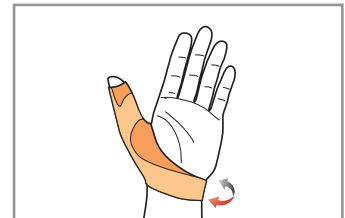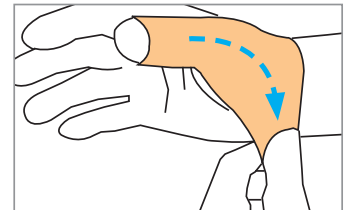

Vertrieb durch:



Rhabanusstraße 38  
65375 Oestrich-Winkel  
Tel: 0 67 23 – 8 08 11 10  
Fax: 0 67 23 – 8 08 11 12  
E-Mail: info@n-ippin.com  
Online-Shop: shop.n-ippin.com

Daiya Industry Co., Ltd.  
1253, Ofuku, Minami-ku, Okayama, Japan 701-0204

Letzte Überarbeitung: Dez 2015



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

