



Gebrauchsanleitung:

Dieses Produkt ist zur Fixierung der Rückenpartie für Hunde konzipiert. Um eine sichere Handhabung zu gewährleisten, soll dieses Produkt nicht für andere Zwecke wie beschrieben eingesetzt werden. Auch sollen den Anweisungen dieser Gebrauchsanweisung gefolgt werden. Sollten Sie noch Fragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Anschrift.

Das Anlegen Bezeichnung der einzelnen Teile

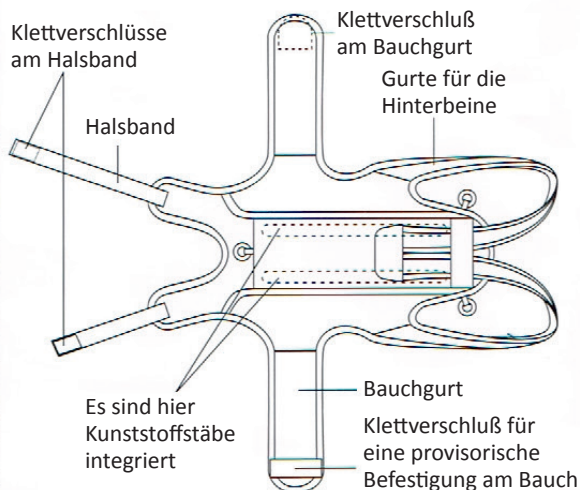


1 Gurte an den Hinterbeinen

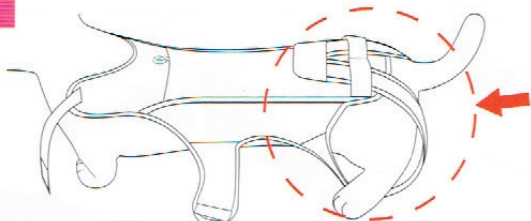


Die Hinterbeingurtschlaufen durch die Hinterbeine ziehen und den Schwanz wie in der Grafik gezeigt rausziehen

2 Halsband und Bauchgurt befestigen

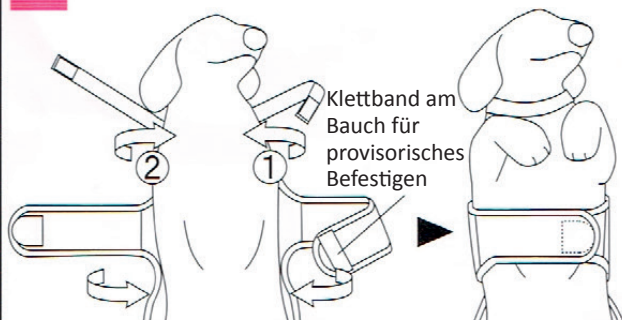

Der Bauchgurt soll mit einer angemessenen Spannung mit dem Klettverschluss am Bauch provisorisch befestigt werden, danach mit dem Klettverschluss am Bauchgurt richtig befestigen. Das Halsband soll wie im Bild in der Reihenfolge 1 und 2 befestigt werden.

3 Nachspannen an den Hinterbeinen

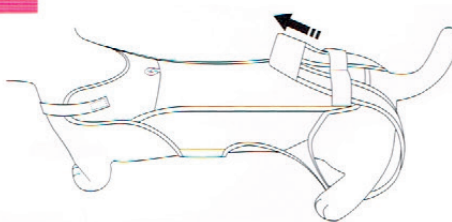


Den Klettverschluss an den Hinterbeingurten öffnen, das Hinterteil kurz anheben und den Gurt gut nachspannen.

Die Hinterbeingurte sollen so wie im linken Bild verlaufen.



4 Fertig angelegt

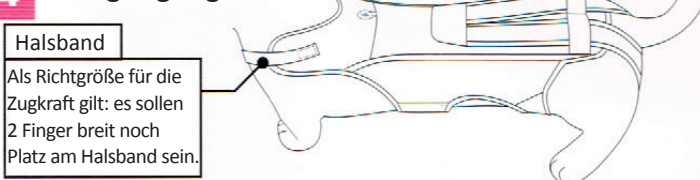


Halsband
Als Richtgröße für die Zugkraft gilt: es sollen 2 Finger breit noch Platz am Halsband sein.


Wenn die Gurte zu locker sind oder zu eng anliegen, bitte nachjustieren.

Die beigelegte Leine kann das Gehen des Hundes weiter unterstützen.

Anbringen der Leine

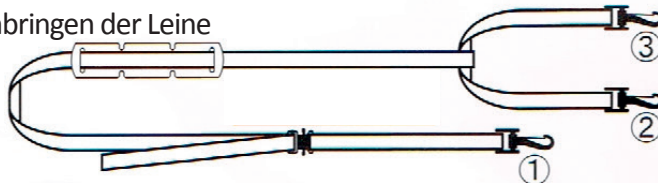

Anwendungsbeispiel

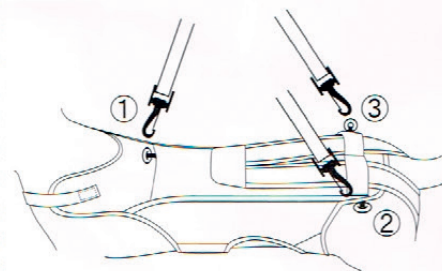

Anbringungsstellen der Verschlüsse:

Am Hinterteil die Verschlüsse 2 und 3, am Nacken den Verschluss 1 anbringen

Hinweise zur Anwendung

- Es kann sein, dass der Hund etwas Zeit braucht, sich an das Korsett zu gewöhnen. Bitte beobachten Sie den Hund entsprechend eine Zeit lang.
- Bei einer Anwendung über einen längeren Zeitraum hinweg behalten Sie den Hund stets im Auge. Wenn Ungewöhnliches zu beobachten ist, beenden Sie sofort die Anwendung und kontaktieren Sie Ihren Tierarzt.
- Dieses Produkt besteht aus Kunstfasern. Wenn Hautirritationen auftreten, soll die Benutzung beendet werden und der Tierarzt konsultiert werden.

Aufbewahrung, Entsorgung, Pflege und Reinigung

- In Deutschland bitte über den Restmüll entsorgen. Die sonstigen Entsorgungsbestimmungen anderer Länder bitte entsprechend beachten.
- An den Klettverschlüssen kann sich das Fell ansammeln. Weil dadurch die Haftfähigkeit vermindert wird, sollen die Klettverschlüsse regelmäßig vom Fell befreit werden.
- Handwäsche bis 30°C. Benutzen Sie bitte ein neutrales Waschmittel. Bitte keine Bleichmittel verwenden!
- Im Schatten trocknen und dabei für eine gute Durchlüftung sorgen. Nicht geeignet für Wäschetrockner. Nicht Bügeln! Keine chemische Reinigung



Daiya Industry Co., Ltd.

1253, Ofuku, Minami-ku, Okayama, Japan 701-0204

Vertrieb durch:

Rhabanusstraße 38, 65375 Oestrich-Winkel
Tel: 0 67 23 – 8 08 11 10, Fax: 0 67 23 – 8 08 11 12
E-Mail: info@n-ippin.com
Online-Shop: shop.n-ippin.com



Material Korsett:

Rückenstäbe (bei Größe S): PP (bei M: PE)
Korsett: Nylon, Polyurethan, Polyester
Klettverschlüsse: Nylon
Ringe: Nylon

Material Korsett:

Gurtdurchzug: Polyacetal
Verschlüsse: Polyacetal
Gurt: PP
Pad: PE

Größen	A = Umfang Hals	B = Umfang Brust	C = Länge Hals bis Schwanzansatz
S	24~33cm	31~53cm	28~35cm
M	32~44cm	50~65cm	35~45cm

